

Ally®

Ihr Partner im Alltag

Stomazubehör



Ally® Stomazubehör


Ihr Partner im Alltag

Jede Körperform ist individuell. Das gilt auch für jedes Stoma. Die Ally® Zubehörpalette wurde entwickelt, um eine noch individuellere Stomapflege zu ermöglichen. Hand in Hand mit dem Stomabeutel können Ally® Produkte dazu beitragen, die Stomaversorgung zuverlässig an ihrem Platz zu halten, Auslaufprobleme zu reduzieren und die umgebende Haut zu schützen und zu pflegen.


Ally® – Ihr Partner im Alltag.



4 Ally® Rings
Hautschutzringe

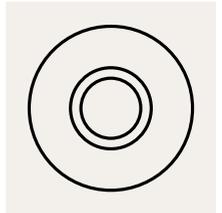

6 Ally® Wafer Extenders
Elastische Fixierstreifen

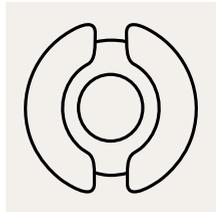


8 Ally® Paste
Stomapaste ohne Alkohol



10 Ally® Powder
Stomapuder



10 Ally® Belt
Stomagürtel

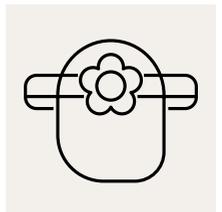

Ally® Rings



Ally® Rings Hautschutzringe

Ally® Rings sind darauf ausgelegt, eine flachere Oberfläche um das Stoma herum zu bilden, indem sie Hohlräume und Falten ausfüllen. Sie sollen Reizungen verhindern, bei Auslaufproblemen helfen und die Abdichtung sichern.

Ally® Rings werden besonders für Personen empfohlen, die Hautvertiefungen oder Falten um ihr Stoma herum haben. Die Ringe sind auch für Personen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit geeignet.

Dicke	Durchmesser	Lieferform	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
3 mm	48 mm	10er-Schachtel	2022483	19109998	29.26.10.6005
4,5 mm	48 mm	10er-Schachtel	2022484	19110010	29.26.10.6005
3 mm	98 mm	10er-Schachtel	2022983	19110027	29.26.10.6005



Anwendung



Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma herum trocken und sauber ist.




Schutzpapier entfernen.

Geeignet für Personen mit eingeschränkter Fingerfertigkeit: Durch die ausstehenden Laschen lässt sich das Schutzpapier leicht entfernen.



Den Hautschutzring durch saches Ziehen und Dehnen in eine Form bringen, die zu Ihrem Körper passt.

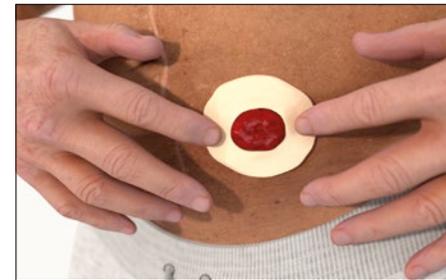

Den Ring um Ihr Stoma platzieren. Sanft mit feuchten Fingern glätten, wenn Sie die Form des Rings anpassen müssen, und um die Anhaftung auf der Haut zu verbessern. Die Außenkante der Abdichtung glätten.



Den Stomabeutel über der Abdichtung platzieren und dabei die Mitte der Basisplatte auf die Mitte des Rings ausrichten, um einen guten Sitz zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Ally® Wafer Extenders



Ally® Wafer Extenders Elastische Fixierstreifen

Ally® Wafer Extenders sollen die Haftfähigkeit verstärken und die Basisplatte für eine längere Tragedauer an ihrem Platz halten. Sie sind darauf ausgelegt, den Konturen und Bewegungen des Körpers zu folgen.

Ally® Wafer Extenders werden besonders für Stomaträger mit peristomalen Hernien, prolabierte Stomata oder Stomata in einer schwierigen Position, Hautvertiefungen oder Knochenvorsprüngen empfohlen.

Radius	Lieferform	Art.-Nr.	PZN
80 mm	20er-Schachtel	2022300	19110062

Anwendung




Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma herum trocken und sauber ist.



Die Hälfte der Schutzfolie entfernen.



Den Fixierstreifen auf die Haut aufbringen und dabei den Rand der Basisplatte überlappen. Der Fixierstreifen sollte die Ränder der Basisplatte um mindestens einen Zentimeter überlappen.

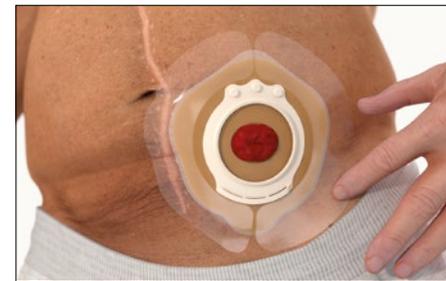

Die restliche Schutzfolie entfernen und glatt streichen, um die Haftung zu verbessern.

Auf der anderen Seite genauso vorgehen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Ally® Paste



Ally® Paste

Stomapaste ohne Alkohol

Ally® Paste dient zum Auffüllen von Falten und Knicken in der intakten Haut um das Stoma herum. Sie soll das Auslaufisiko reduzieren, die Haut vor Ausflüssen schützen und dabei helfen, die Tragedauer zu verlängern.

Ally® Paste wird besonders für Personen empfohlen, die Hautvertiefungen oder Falten um ihr Stoma herum haben.

Lieferform	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Tube mit 80 g	2022200	19110033	29.26.10.0040

Anwendung




Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma herum trocken und sauber ist.



Die Paste direkt aus der Tube auf die Haut auftragen. Sie kann auch direkt auf die Basisplatte aufgetragen werden. Die Paste nicht auf die gesamte Klebefläche auftragen.



Falls erforderlich, die Paste mit angefeuchteten Fingern, Tupfer oder Tuch glätten.

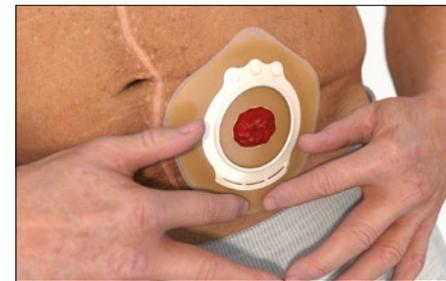

Nach dem Anlegen der Basisplatte einen guten Sitz um das Stoma herum sicherstellen, indem Sie die Basisplatte mit den Fingern andrücken. Die Pastenreste an der Tube mit einem sauberen Tuch entfernen. Die Tube wieder fest verschließen, um Kontakt mit Feuchtigkeit zu vermeiden.



Die Tubenpresse verwenden, um die Tube auf einfache Weise zu entleeren.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Ally® Powder



Ally® Powder Stomapuder

Ally® Powder ist darauf ausgelegt, die Feuchtigkeit an der peristomalen Haut um das Stoma herum zu absorbieren und sie trocken zu halten. Es soll die Haut schützen, Reizungen reduzieren und eine bessere Haftung des Stomabeutels ermöglichen. Das Puder kann den Heilungsprozess gereizter Haut fördern.

Ally® Powder wird besonders für Personen mit Stoma empfohlen, deren Haut gerötet, wund oder gereizt ist.

Lieferform	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
Flasche mit 28 g	2022100	19110056	29.26.10.1010

Ally® Belt



Ally® Belt Stomagürtel

Ally® Belt dient der Fixierung aller konvexen B. Braun Versorgungen sowie der Softima® 3S Systeme.

Größe	Art.-Nr.	PZN	HiMiV
60–110 cm ungedehnt	5028DE	00433331	29.26.11.0021

Anwendung



Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma herum trocken und sauber ist.



Die Kappe abschrauben, die Düse der Flasche auf die zu pflegende Hautpartie richten und die Flasche leicht schütteln, um eine angemessene Menge des Puders auf die Haut um das Stoma aufzutragen.



Das Puder gleichmäßig mit einem Tuch verteilen. Das überschüssige Puder entfernen, bevor Sie die Haftplatte des Beutels anbringen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Seit fast 50 Jahren sind wir in der Stomaversorgung aktiv und unterstützen Personen mit Stoma mit einfach zu handhabenden Stomabeuteln und Zubehör und bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes.



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (05661) 9147-7000
E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen