

## Adapt Hautschutzpuder

### Allgemeine Informationen

- Puder kann verwendet werden, um Feuchtigkeit zu absorbieren, die aufgrund wunder Haut rund um das Stoma auftreten kann. Die Verwendung des Puders gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung und damit die Heilung der Haut.
- Stäuben Sie den Puder hauchdünn auf, nachdem Sie die Haut gewaschen und gründlich abgetrocknet haben.

### Verwendung des Adapt Hautschutzpuders

1. Waschen und trocknen Sie gründlich die Haut.
2. Bringen Sie den Adapt Hautschutzpuder hauchdünn auf die nässenden Hautstellen auf, bis die irritierten Hautstellen bedeckt sind.
3. Der Adapt Hautschutzpuder sollte nur die feuchte Hautfläche bedecken. Entfernen Sie vorsichtig überschüssigen Puder.
4. Anschließend wird die Stomaversorgung wie gewohnt angelegt. Verwenden Sie vorzugsweise einen durchgehenden Hautschutz, wenn die nässenden Läsionen beispielsweise durch die Verwendung einer Klebefläche hervorgerufen wurden.



Adapt Hautschutzpuder  
(Best.-Nr. 7906)



Anwendung Adapt  
Hautschutzpuder

### Aus folgenden Gründen kann die Haut rund um das Stoma irritiert sein oder nässen:

- Undichtigkeiten der Stomaversorgung durch Unterwanderungen
- Nicht passgenau zugeschnittene Öffnung der Hautschutz- oder Basisplatte (zu groß, zu klein, falsche Form)
- Allergische Reaktion auf eines der Produkte, das mit der Haut in Berührung kommt
- Wunden nahe des Stomas, z. B. Operationsnähte oder durch andere Krankheiten verursachte Wunden

### Grundsätzlich gilt immer:

**Geschädigte und nässende Haut sollte in jedem Fall von einem Arzt oder einer Fachkraft begutachtet werden, um die Ursache für die Läsionen zu bestimmen und diese behandeln zu können.**

## Häufig gestellte Fragen

**Sollte ein Hautschutzfilm verwendet werden, um den Puder vor dem Anlegen der Versorgung auf der Haut zu fixieren?**

Es ist nicht notwendig, einen Hautschutzfilm unter dem Adapt Hautschuttpuder anzuwenden. Die meisten dieser Produkte enthalten Alkohol, welcher ein Brennen auf der geschädigten Haut verursacht.

**Befindet sich ein bestimmter medizinischer Wirkstoff im Adapt Hautschuttpuder?**

Nein. Der Adapt Hautschuttpuder absorbiert überschüssige Feuchtigkeit und gewährleistet somit eine optimale Haftung der Stomaversorgung. Die Haut kann darunter heilen.

**Kann ich anderen Puder verwenden, wie z. B. Talkum?**

Nein. Kosmetischer Puder wie Talkum beeinträchtigt die Haftfähigkeit der Stomaversorgung. Dies würde zu Undichtigkeiten und weiteren Schädigungen der Haut führen.

**Wie lange wird die Anwendung des Adapt Hautschuttpuders empfohlen?**

Die Anwendung des Puders sollte beendet werden, wenn die Haut abgeheilt ist und nicht mehr nässt. Der Einsatz des Puders wird nicht zum Anbringen auf gesunder Haut empfohlen.

### Deutschland

Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25  
D-80992 München

**Beratung für Betroffene:**  
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

**Beratung für Fachpersonal:**  
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

**Bestellung:**  
Telefon: 0 89/99 28 86-122  
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei  
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr,  
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)  
[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

### Österreich

Hollister GmbH  
Heinrich-Collin-Str. 1  
A-1140 Wien

**Beratung:**  
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

**Bestellung:**  
Telefon: 01/8 77 08 00-0  
Telefax: 01/8 77 08 00-22  
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr,  
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [hollister.oesterreich@hollister.com](mailto:hollister.oesterreich@hollister.com)  
[www.hollister.at](http://www.hollister.at)

### Schweiz

Hollister  
Bernstrasse 388  
CH-8953 Dietikon

**Beratung:**  
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

**Bestellung:**  
Telefon: 044/730 45 05  
Telefax: 044/730 54 44  
Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr  
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: [info@hollister.ch](mailto:info@hollister.ch)  
[www.hollister.ch](http://www.hollister.ch)