



Die neuen CeraPlus™  
Hautschutzerweiterungen  
sind da!



CeraPlus™  
Hautschutzerweiterungen



Stomaversorgung  
*Gesunde Haut. Gute Aussichten.*

# CeraPlus™ Hautschutzerweiterungen – mit Ceramiden angereichert, um Ihre Haut zu schützen und ein zusätzliches Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

CeraPlus™ Hautschutzerweiterungen bestehen aus einem dünnen, flexiblen Hydrokolloid-Haftmaterial. Umgeben Sie die Hautschutzplatte mit drei einzelnen Streifen oder verwenden Sie sie in für Sie notwendigen Bereichen, um eine individuelle Passform zu erhalten.

CeraPlus™ Hautschutzerweiterungen tragen dazu bei, Unterwanderungen zu verhindern, indem sie die Hautschutzplatte fixieren und dem Abheben der Ränder entgegenwirken. Sie passen sich problemlos den natürlichen Falten und Bewegungen des Körpers an und tragen dazu bei, die Tragezeit des Hautschutzes zu verlängern. Für ein gutes Selbstbewusstsein den ganzen Tag über. CeraPlus™ Stomaproducte sind mit Ceramiden angereichert, einem natürlichen Bestandteil der Haut.

Die mit Ceramiden angereicherte Hautschutzformel hilft, eine schützende, wasserfeste Schutzschicht zu bilden, die dazu beiträgt, die Haut vom ersten Tag an gesund zu halten.

## Die Eigenschaften auf einen Blick:


- Mit Ceramiden angereichert
- Dünnes, flexibles Hydrokolloid-Haftmaterial
- Für eine einfachere Handhabung und Anwendung
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

SELBSTZAHLERPRODUKT<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Die Hautschutzerweiterungen sind ohne Rezept erhältlich und werden nicht von der Krankenkasse erstattet. Sie erhalten diese bei Ihrem Homecare-Unternehmen, Sanitätshaus oder Ihrer Apotheke. Bestellnummer 79402, Inhalt/Packung 30 Stück, PZN 19152020

# So verwenden Sie die neue Hautschutzerweiterung:

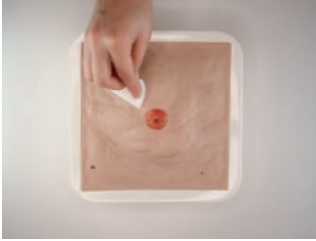

Entfernen Sie die alte Hautschutzplatte und reinigen Sie die Haut um das Stoma. Bringen Sie eine neue Hautschutzplatte an.



Kleben Sie die Hautschutzerweiterungen um die Hautschutzplatte auf die Haut. Entfernen Sie das restliche Trägerpapier.




Entfernen Sie das Trägerpapier der Hautschutzerweiterung durch leichtes Dehnen an jedem Ende.



Fahren Sie mit den Fingern um die Hautschutzerweiterungen, um sicherzustellen, dass sie gut haften. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Hautschutzerweiterungen um Ihre Platte.



Entfernen Sie nur eine Seite des Trägerpapiers.

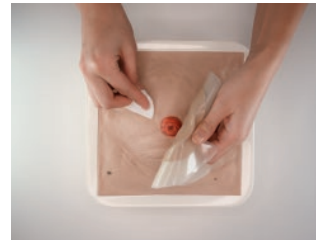

Die Hautschutzerweiterungen lassen sich leicht bei jedem Versorgungswechsel entfernen.

Hollister Incorporated  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25  
80992 München  
www.hollister.de

### **Kontaktdaten für AnwenderInnen und Angehörige**


Telefon: 0800/101 50 23 (gebührenfrei)

Mo. – Do.: 8:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 8:00 – 14:00 Uhr

E-Mail: [beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)

Dieser QR Code verlinkt auf einen Film,  
der die Anwendung von Hautschutz-  
erweiterungen zeigt.

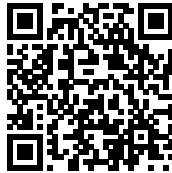

Die hier gegebenen Informationen sind nicht als medizinische Beratung gedacht und sollen den Rat Ihres eigenen Arztes oder anderer medizinischer Fachkräfte nicht ersetzen. Diese Informationen sollten auch nicht dazu verwendet werden, in einem medizinischen Notfall Hilfe zu suchen. In einem medizinischen Notfall sollten Sie sich sofort persönlich in ärztliche Behandlung begeben. Lesen Sie vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

Hollister, das Hollister Logo, CeraPlus und „Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated. Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.  
© 2024 Hollister Incorporated.

