

Adapt Hautschutzringe konvex

Allgemeine Informationen

- Hautschutzringe werden verwendet, um Unebenheiten der stomaumgebenden Haut abzudichten und somit eine plane Grundlage zum Anbringen der Stomaversorgung zu schaffen.
- Die zusätzliche Verwendung von Hautschutzringen kann helfen, eine Unterwanderung des Stomaversorgungssystems durch Ausscheidungen zu vermeiden.
- Die Hautschutzringe können zugeschnitten, gedehnt und miteinander kombiniert werden, um die Stomaversorgung individuellen Bedürfnissen anzupassen.
- In Kombination mit einer konvexen Stomaversorgung kann eine tiefere Konvexität geschaffen werden. Bei Anbringen auf einer planen Stomaversorgung wird eine flexible Konvexität hergestellt.

Verwendung der konvexen Adapt Hautschutzringe

1. Bitte achten Sie darauf, den Hautschutz nur auf saubere, trockene Haut ohne Fett- und Seifenrückstände aufzubringen.
2. Schneiden Sie die Stomaversorgung auf die Stomagröße zu.
3. Entfernen Sie die Schutzfolien bzw. das Abziehpapier von beiden Seiten des Hautschutzrings.
4. Passen Sie den Hautschutzring der Stomaform bzw. -größe an.
5. Bringen Sie den Hautschutzring mit der planen Seite an der bereits ausgeschnittenen Öffnung des Stomaversorgungssystems an.
6. Falls es notwendig ist, können Sie mehrere Hautschutzringe miteinander kombinieren.
7. Bringen Sie die Versorgung nun wie gewohnt an.

Grundsätzlich gilt immer:

Geschädigte Haut sollte in jedem Fall von einem Arzt oder einer Fachkraft begutachtet werden, um die Ursache für die Irritation oder Reizung zu bestimmen und diese behandeln zu können.



Adapt Hautschutzringe konvex
Ringgröße 20 mm (Best.-Nr. 79520)
Ringgröße 30 mm (Best.-Nr. 79530)
Ringgröße 40 mm (Best.-Nr. 79540)



Dehnen für eine perfekte Anpassung an das Stoma



Hautschutzringe mit der planen Seite auf der Stomaversorgung anbringen

Häufig gestellte Fragen

Woher weiß ich, welche Ringgröße ich verwenden soll?

Wählen Sie die Ringgröße, die der Stomagröße am nächsten kommt. Die Adapt Hautschutzringe können gestaucht und gedehnt werden.



Ringgröße 20 mm – Stomagröße 17–26 mm – Bestell-Nr. 79520
Ringgröße 30 mm – Stomagröße 27–36 mm – Bestell-Nr. 79530
Ringgröße 40 mm – Stomagröße 37–46 mm – Bestell-Nr. 79540

Was ist, wenn der Ring für das Stoma zu groß ist?

Man kann aus dem Hautschutzring ein Stück ausschneiden und die Enden wieder miteinander verbinden, um einen kleineren Ringdurchmesser zu erhalten.

Das Stoma ist nicht rund. Kann ich trotzdem die Hautschutzringe verwenden?

Ja. Die Adapt Hautschutzringe können durch Dehnen an die Form des Stomas angepasst werden.

Wie werden die Adapt Hautschutzringe entfernt?

Der Hautschutzring wird zusammen mit der Stomaversorgung entfernt. Sollten Rückstände auf der Haut verbleiben, reiben Sie diese sanft von der Haut.

Können die Adapt Hautschutzringe auch bei Irritationen der Haut eingesetzt werden?

Ja. Die konvexen Adapt Hautschutzringe sind alkoholfrei und verursachen keine Reizung der Haut.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr,
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@hollister.com
www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich-Collin-Str. 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr,
Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com
www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch
www.hollister.ch